


### Möglichkeiten der Blutentnahme mit herkömmlichen Kanülen nach BGR / TRBA 250, Abschnitt 4.2.4

Neben der Verwendung von Kanülen mit Nadelschutz nach Abschnitt 4.2.4 Absatz 1 und 2 dürfen bei einer Blutentnahme (ausgenommen der in Absatz 1 aufgeführten Bereiche) herkömmliche Kanülen eingesetzt werden, wenn alle in Absatz 3 aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind.

#### Aspirationstechnik




#### Vakuumtechnik

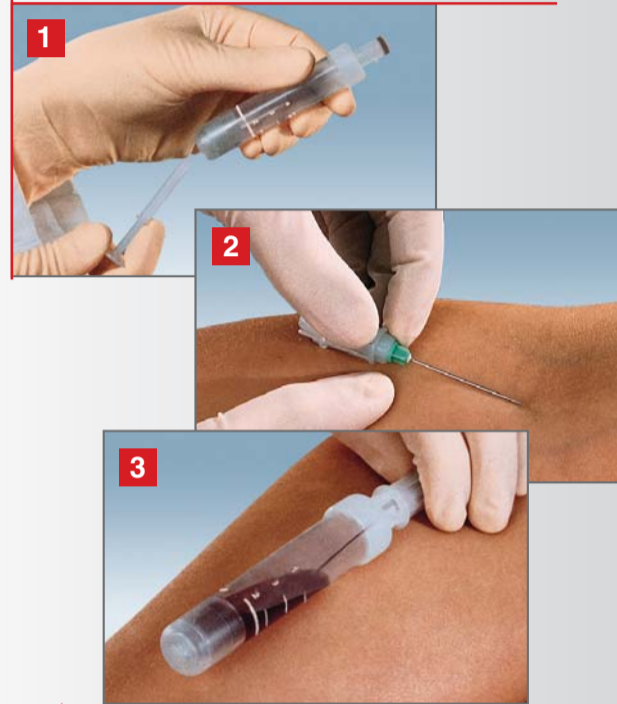


#### Sicherheit auf kürzestem Weg

Kanüle aus der Vene ziehen ...

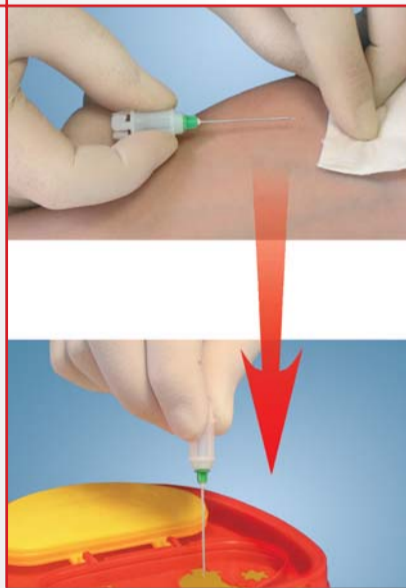


... und sofort in den bereitstehenden Entsorgungsbehälter entsorgen.

#### S-Monovetten-Kanüle bitte nicht biegen!

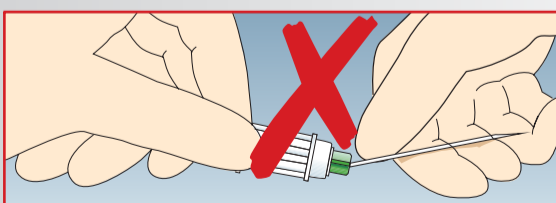

**Falsch!**

Das Zurechtbiegen der Kanüle ist bei der Blutentnahme mit der S-Monovette® nicht erforderlich!

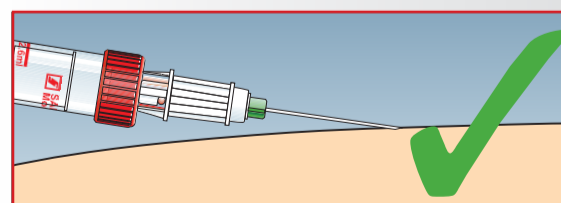

**Richtig!**

- kein Zurechtbiegen
- flacher Punktionswinkel