


Blutentnahme und Transport des QuantiFERON®-TB Gold Plus IT Test

Blutentnahme


- Sie erhalten 4 Röhrchen für eine hohe Genauigkeit
- Bitte Entnahme nicht direkt nach einer großen Mahlzeit, kleines Frühstück ist erlaubt
- Entnehmen Sie von jedem Patienten je 1 ml venöses Blut in jedes der vier QFT-Plus Blutentnahmeröhrchen

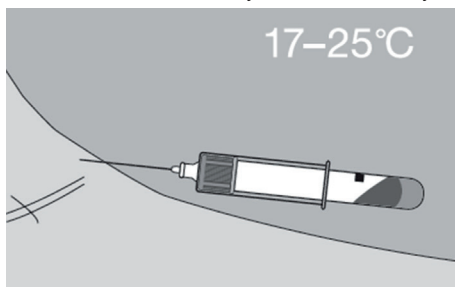

Bei der Blutentnahme sollten die Röhrchen eine Temperatur von 17-25 °C aufweisen.

Da die 1-ml-Röhrchen das Blut relativ langsam aufnehmen, belassen Sie das Röhrchen nach dem scheinbaren Erreichen des Füllstands bitte noch **2-3 Sekunden** auf der Nadel. Wird bei der Blutentnahme die schwarze Markierungslinie am Rand des Etiketts nicht erreicht, entnehmen Sie bitte eine neue Blutprobe.

- Unmittelbar nach dem Befüllen der Röhrchen schwenken Sie diese bitte 10 x gerade fest genug, um sicherzustellen, dass die Innenwand der Röhrchen ganz mit Blut bedeckt ist, damit sich die Antigene aus der Wandbeschichtung lösen können

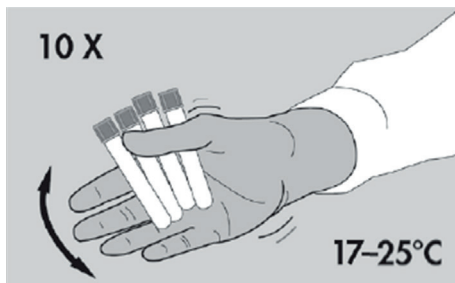

Wichtig:

Zu heftiges Schütteln kann den Gelpfropf zerstören und zu fehlerhaften Ergebnissen führen.

- Beschriften Sie alle 4 Röhrchen mit den Patientendaten (Name, Geburtsdatum)

Transport

- Die Blutproben müssen schnellstmöglich (innerhalb von 16 Stunden nach der Blutentnahme) im auswertenden Labor bei 37 °C inkubiert werden
- Senden Sie die Röhrchen bei 17-27 °C ins Labor
- Wenn längere Verzugszeiten unvermeidlich sind, kommt auch eine Bebrütung in der Praxis mit anschließender Zentrifugation in Frage. Bitte halten Sie dazu Rücksprache mit dem Labor