


Дата забора пробы стула:

Внесите, пожалуйста, дату забора пробы стула и вложите этот документ к пробирке заполненной пробой стула!

## Руководство по забору пробы стула с помощью пробирок для забора проб стула

### Устройство пробирок для забора проб стула

Пробирка для забора пробы стула, заполненная жидкостью

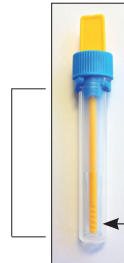

**Желтое:** Дозировочная палочка с щелчковым замком

**Голубое:** Конусная часть крышки для удаления избытка пробы стула

Конец дозировочной палочки с углублениями

#### 1 Извлечь дозировочную палочку

Открутите **верхнюю желтую часть крышки** и достаньте находящуюся там дозировочную палочку. **Голубая часть крышки остается на пробирке закрытой!**

#### 2 Забор пробы стула

Дозировочную палочку **3-раза** воткните в пробу кала. Углубления на конце дозировочной палочки должны быть полностью заполнены пробой стула.

#### 3 Дозировочную палочку можно только 1 раз вернуть в пробирку

Дозировочная палочка с находящейся на ней пробой стула должна быть **однократно** вставлена обратно в пробирку **и больше не доставаться**. Избыточно набранная часть образца при этом останется в голубой части крышки. Пожалуйста, обратите внимание: внутрь пробирки должно попасть только **маленькое, точно определенное количество образца** с дозировочной палочки. Затем закрутите пробирку так, чтобы желтый колпачок провернулся до слышимого щелчка.

**Пожалуйста, обратите внимание:** Растворяясь **проба стула практически не окрашивает раствор**, находящийся в пробирке. Если Вы не соблюдали инструкцию и внесли дозировочную палочку в пробирку более одного раза, тогда цвет раствора станет более коричневым и **ее нельзя будет измерить, так как это может привести к ложноположительному результату!**

#### 4 Доставка пробы в лабораторию

Подготовленную, как описано в пунктах 1-3, пробу стула Вы должны принести в лабораторию не позднее следующего дня.



Immundiagnostik AG  
Stubenwald-Allee 8a  
64625 Bensheim, Germany  
Tel.: +49 (0) 62 51/70 19 00  
Fax: +49 (0) 62 51/84 94 30  
info@immundiagnostik.com  
www.immundiagnostik.com



Barcode