



Anleitung zur schrittweisen Durchführung der Stuhlprobennahme



1 Vor- und Nachname sowie das Datum der Probennahme auf das etikettierte Proberöhrchen schreiben.

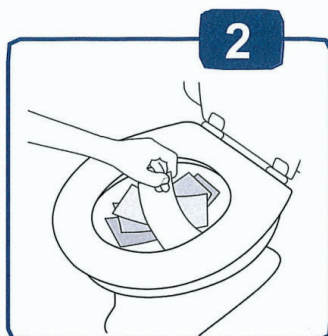


2 Vor dem Stuhlgang zunächst einige Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe in die Toilette legen.

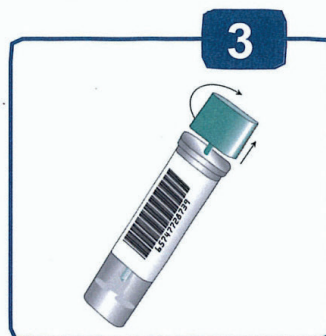


3 Nach dem Stuhlgang das Proberöhrchen nehmen und die türkise Kappe durch leichtes Drehen samt Teststab aus dem Röhrchen ziehen.




4 Mit der Spitze des türkisen Teststabs an verschiedenen Stellen über die Stuhlprobe streichen.

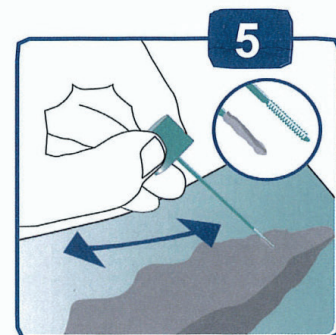


5 Die Rillen der Spitze müssen danach vollständig mit Stuhlprobe gefüllt sein.

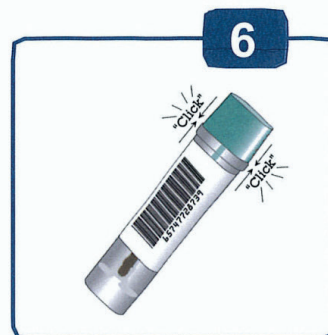

6 Teststab in das Proberöhrchen stecken und dieses somit verschließen. Nach einem hörbaren „Klick“ ist das Proberöhrchen ordentlich verschlossen. Probenahme **nicht** wiederholen!

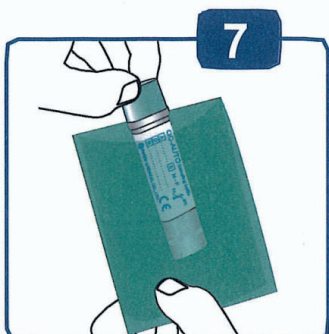

7 Das verschlossene Proberöhrchen kräftig schütteln. Stecken Sie es in den grünen Beutel und verschließen Sie diesen.

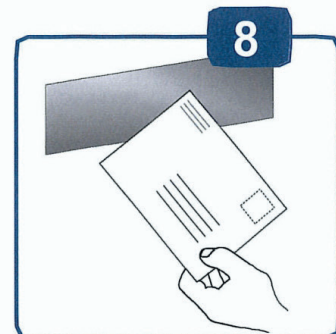

8 Bringen Sie das Proberöhrchen so rasch wie möglich an die ausgebende Stelle zurück; eine schnelle Rückgabe erhöht die Probensicherheit.

Pro Patient wird ein Probenentnahmeset im Rahmen der Untersuchung zur Verfügung gestellt.